

Unsere Schutzbezüge

Unsere Matratzen und Lagerungshilfen für den Klinik- und Heimbereich liefern wir mit einem PERLASTIC® Vollschutzbezug.

Selbstverständlich können Sie aber auch reine Schutzbezüge für Ihre Matratzen und Lagerungshilfen, Kissen und Decken von uns beziehen.

Eigenschaften von PERLASTIC® und PELASTIC® soft Schutzbezügen

Unsere Bezüge aus PERLASTIC® und PERLASTIC® soft sind als Voll- und Halbschutzbezüge verfügbar.

Vollschutzbezüge schützen Ihre Matratze und Lagerungshilfe komplett. Halbschutzbezüge hingegen sorgen für den zuverlässigen Schutz der Liegefläche Ihrer Matratzen und werden mittels Einsteckschuhen und Haltebändern auf der Matratze oder dem Schaumstoffkern befestigt.

Das Material unserer Schutzbezüge ist

→ **flüssigkeits-, bakterien- und virendicht**

- Flüssigkeitsdichte nach DIN 53886 > 3.000 mm
- zur Infektionsprophylaxe
- als zuverlässiger Schutz des Matratzenkerns
- für eine einfache Aufbereitung

→ **beständig gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel**

- auch nach 100facher alkoholischer Desinfektion
- zur Infektionsprophylaxe
- für eine einfache Aufbereitung

→ **beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette**

- für eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit

→ **atmungsaktiv**

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53122, Klima B ca. 600 g/m² (PERLASTIC®) und ca. 1.600 g/m² (PERLASTIC® soft) in 24 h bei 37 °C
- für ein angenehmes Liege- und Schlafklima

→ **bi-elastisch und formbeständig**

- Flächengewicht 230 g/m² (PERLASTIC®) und 160 g/m² (PERLASTIC® soft) +/- 5 %
- für eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- unterstützt das Einsinkvermögen und damit den Liege- und Schlafkomfort

Ersatzbezüge sowie Maßanfertigungen sind in Absprache kurzfristig lieferbar.

Kennzeichnung der Bezüge

Unsere Produkte verfügen als Medizinprodukte Klasse 1 über ein CE-Kennzeichen und sind entsprechend Medizinproduktegesetz (MPG) gekennzeichnet:

→ Bedruckung auf der Liegefläche des Bezuges

- Artikelbezeichnung (Name und Artikel-Nummer)
- Herstellername und Kontaktdaten
- Anwendungsempfehlung durch Kennzeichnung der Liegefläche
- Aufbereitungsempfehlung in allgemein üblichen und daher gut verständlichen Wäschesymbolen

Gern fügen wir für Sie der Bedruckung individuelle Kennzeichnungen, zum Beispiel das Logo und die Anschrift Ihrer Einrichtung oder Hinweise für die Wäscherei, unentgeltlich hinzu.

→ Einnähetikett direkt am Beginn des L-Reißverschlusses

- Bezeichnung des Bezugsstoffes
- Herstellername und Kontaktdaten
- Datum der Herstellung
- Chargen-Nummer
- Aufbereitungsempfehlung in allgemein üblichen und daher gut verständlichen Wäschesymbolen

Aufbereitung der Bezüge

Bitte beachten Sie: Schutzbezüge mit mechanischen Verletzungen der Polyurethan-Beschichtung oder mit Schimmelpilzbefall, also schwarzem, punktförmigem Lochfraß, sind gemäß MPBetreibV auszutauschen. Sie stellen eine Gefahr für Ihre Patienten dar!



bei normaler Verschmutzung und Patientenwechsel

Wischdesinfektion mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch



bei grober Verschmutzung oder hochkontagiösen Erkrankungen

waschbar bis 95 °C – trocknen im Tumbler bis 120 °C – nicht mangeln



nicht erforderlich, aber möglich

VDV-Kammer bis 105 °C

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern Aufbereitungspläne und Schulungsmaterialien für Ihre zuständigen Mitarbeiter vor Ort zur Verfügung.

Einen ersten Eindruck von der Aufbereitung unserer Matratzen und Schutzbezüge liefert auch unser Film „VISKOLASTIC® Antidekubitusmatratzen in der Medizinischen Hochschule Hannover“, den Sie unter www.wulff-med.de unter „Produkte in Aktion“ finden.

Andere Bezugsstoffe

Für Bereiche, in denen die Infektionsprophylaxe sowie der Umgang mit inkontinenten Personen nicht an der Tagesordnung sind, bieten wir eine Reihe weiterer Bezugsstoffe an. Fragen Sie einfach nach: 0 48 36 / 99 64 10. Wir beraten Sie gern.