


VISKOLASTIC® Mikrolagerungskissen

zur Positionsunterstützung im Rahmen einer strukturierten Mikrolagerung
und zum Fixieren von Extremitäten

*Entwickelt mit der
BG Unfallklinik
Ludwigskafen (2008)*

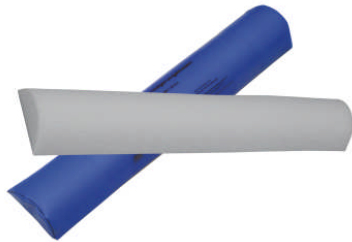

- zur Unterstützung der Kniekehle bei Schienenlagerung
- als Rutschbremse bei der Positionsunterstützung, zum Beispiel beim Sitzen
- zur Unterstützung der Schulterblätter, zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme
- zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule in Rückenlage
- zur Fixierung von Extremitäten in allen Schienen
- spart den Einsatz kleiner Einmalkissen zur Lagerung

Material

Schaumstoffkern

LV.MK1

- viskoelastischer Polyurethanschaum – Raumgewicht 85 / Stauchhärte 3,5 kPa

Bezug

blauer PERLASTIC® anti slip Vollschutzbezug

(andere Farben oder Bezugstoffe sowie ohne Bezug in Absprache möglich)

- aus Polyester-Rundstrickware mit diffusionsfähiger Polyurethanbeschichtung
- mit „Anti slip Ausstattung“ für besseren Halt
- mit Reißverschluss (andere Verschlüsse oder komplettes Einnähen in Absprache möglich)

Ausstattung und Verarbeitung

- entsprechend MPG (CE-Kennzeichen) und Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1
(für den direkten Hautkontakt mit Babys geeignet)

Schaumstoffkern

- aus viskoelastischem Polyurethanschaum

PERLASTIC® anti slip Vollschutzbezug

- mit „Anti slip Ausstattung“
- flüssigkeits-, bakterien- und virendicht
 - Flüssigkeitsdichte nach DIN 53886 > 3.000 mm
- beständig gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel
 - auch nach 100facher alkoholischer Desinfektion
- beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette
- atmungsaktiv
 - Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53122, Klima B ca. 600 g/m² in 24 h bei 37 °C
- bi-elastisch und formbeständig, besonders stabil und haltbar
 - Flächengewicht 230 g/m² +/- 5 %

Kennzeichnung

CE-Kennzeichen (Medizinprodukt Klasse 1), Artikelbezeichnung und -spezifikation, Herstellername und Datum der Herstellung, Chargen-Nummer sowie Anwendungs- und Aufbereitungsempfehlung


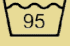




Zusätzliche Kennzeichnung, zum Beispiel Logo und Name Ihrer Einrichtung, in Absprache möglich.

Gutachten

- Flammprüfung nach DIN EN 597 (CENTEXBEL Zwijnaarde, 30.01.2004)
- spezielle Gutachten zum Schutzbezug

Aufbereitung

Lagerungshilfen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind nach Auffassung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) **Medizinprodukte der Klasse 1**. Sie unterliegen damit den Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes (MPG) und der Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV). So sind zum Beispiel Mitarbeiter, die Lagerungshilfen aufbereiten, hinsichtlich Aufbereitungsverfahren und zulässiger Desinfektionsmittel einzuweisen.

Was?	Wann? (Bitte ggf. ergänzen!)	Wie?	Womit? (Bitte eintragen!)	Wer? (Bitte eintragen!)
VISKOLASTIC® Mikrolage- rungskissen (PERLASTIC® Schutzbezug und Schaumstoffkern)	bei Verschmutzung, nach jedem Patientenwechsel	 Wisch-desinfektion Abwischen des Schutzbezuges mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch		
	bei grober Verschmutzung oder hochkontagiösen Erkrankungen	chemo-thermische Aufbereitung des Schutzbezuges in der Waschmaschine mit einem entsprechend geeigneten, desinfizierenden Waschmittel  bis 95 °C  trocknen im Tumbler bis 120 °C  NICHT MANGELN!		
	nicht erforderlich, aber möglich	Aufbereitung in der VDV-Kammer  bis 75 °C		
Schaumstoffkern (ohne Bezug)	bei defektem Schutzbezug ACHTUNG: Der defekte Schutzbezug ist zu entsorgen (siehe MPBetreibV)!	Aufbereitung in der VDV-Kammer  bis 75 °C		

Die Wäschesymbole finden Sie auch auf der Bedruckung und dem Einnähetikett unseres PERLASTIC® Schutzbezuges.

Auf unserem Aufbereitungsplan können Sie die entsprechend in Ihrer Einrichtung verwendeten Desinfektions- und Waschmittel sowie die Verantwortlichen einfügen. Sie können ihn für Schulungen und als Gedächtnisstütze für Ihre Mitarbeiter verwenden. Die entsprechende PDF-Datei finden Sie auch auf unserer Internetseite www.wulff-med.de im Klinik- und Heimbereich unter Infomaterial / Produkte oder über unsere Suchfunktion oben rechts.

VISKOLASTIC® Mikrolagerungskissen

Beispiel – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

Art.-Nr.	Abmessungen Schaumstoffkern	Material	Raumgewicht / Stauchhärte
LV.MK1-50.9.4	50 x 9 x 4 cm	viskoelastischer Polyurethanschaum	85 / 3,5 kPa

Die Lieferung erfolgt staubfrei verpackt in PE-Folie und, falls erforderlich, einem zusätzlichen Karton, frei Haus. Ersatzbezüge sind kurzfristig lieferbar. Sondergrößen und -höhen sowie Zuschnitte, auch mit anderen Raumgewichten und Stauchhärten, sind in Absprache möglich.