

VISKOLASTIC® Nackenstützkissen zur Entlastung von Nacken und Schultern



in drei Liegehöhen:

- Variante F = 8 cm hoch
- Variante M = 10 cm hoch
- Variante H = 13 cm hoch

in jeweils 2 Komfortstufen:

- premium = fester, stabiler und länger haltbar
- medium = weicher

Material

Schaumstoffkern

LV.NK2

- viskoelastischer Polyurethanschaum – Raumgewicht 50 / Stauchhärte 2,2 kPa

LV.NK3

- viskoelastischer Polyurethanschaum – Raumgewicht 85 / Stauchhärte 2,7 kPa

Bezug

weißer PERLASTIC® soft Vollschutzbezug

(andere Farben oder Bezugstoffe sowie ohne Bezug in Absprache möglich)

- aus Polyester-Rundstrickware mit diffusionsfähiger Polyurethanbeschichtung
- mit Reißverschluss (andere Verschlüsse oder komplettes Einnähen in Absprache möglich)

Ausstattung und Verarbeitung

- entsprechend MPG (CE-Kennzeichen) und Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1
(für den direkten Hautkontakt mit Babys geeignet)

Schaumstoffkern

- aus viskoelastischem Polyurethanschaum

PERLASTIC® soft Vollschutzbezug

- flüssigkeits-, bakterien- und virendicht
 - Flüssigkeitsdichte nach DIN 53886 > 3.000 mm
- beständig gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel
 - auch nach 100facher alkoholischer Desinfektion
- beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette
- atmungsaktiv
 - Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53122, Klima B ca. 1.600 g/m²
in 24 h bei 37 °C
- bi-elastisch und formbeständig, besonders stabil und haltbar
 - Flächengewicht 160 g/m² +/- 5 %

Kennzeichnung

CE-Kennzeichen (Medizinprodukt Klasse 1), Artikelbezeichnung und -spezifikation, Herstellername und Datum der Herstellung, Chargen-Nummer sowie Anwendungs- und Aufbereitungsempfehlung


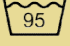



Zusätzliche Kennzeichnung, zum Beispiel Logo und Name Ihrer Einrichtung, in Absprache möglich.

Gutachten

- Flammprüfung nach DIN EN 597 (CENTEXBEL Zwijnaarde, 30.01.2004)
- spezielle Gutachten zum Schutzbezug

Aufbereitung

Lagerungshilfen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind nach Auffassung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) **Medizinprodukte der Klasse 1**. Sie unterliegen damit den Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes (MPG) und der Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV). So sind zum Beispiel Mitarbeiter, die Lagerungshilfen aufbereiten, hinsichtlich Aufbereitungsverfahren und zulässiger Desinfektionsmittel einzuweisen.

Was?	Wann? (Bitte ggf. ergänzen!)	Wie?	Womit? (Bitte eintragen!)	Wer? (Bitte eintragen!)
VISKOLASTIC® Nackenstützkissen (PERLASTIC® soft Schutzbezug und Schaumstoffkern)	bei Verschmutzung, nach jedem Patientenwechsel	 Wisch- desinfektion Abwischen des Schutzbezuges mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch		
	bei grober Verschmutzung oder hochkontagiösen Erkrankungen	chemo-thermische Aufbereitung des Schutzbezuges in der Waschmaschine mit einem entsprechend geeigneten, desinfizierenden Waschmittel  bis 95 °C  trocknen im Tumbler bis 120 °C  NICHT MANGELN!		
	nicht erforderlich, aber möglich	Aufbereitung in der VDV-Kammer  bis 75 °C		

Die Wäschesymbole finden Sie auch auf der Bedruckung und dem Einnähetikett unseres PERLASTIC® Schutzbezuges.

Auf unserem Aufbereitungsplan können Sie die entsprechend in Ihrer Einrichtung verwendeten Desinfektions- und Waschmittel sowie die Verantwortlichen einfügen. Sie können ihn für Schulungen und als Gedächtnisstütze für Ihre Mitarbeiter verwenden. Die entsprechende PDF-Datei finden Sie auch auf unserer Internetseite www.wulff-med.de im Klinik- und Heimbereich unter Infomaterial / Produkte oder über unsere Suchfunktion oben rechts.

VISKOLASTIC® Nackenstützkissen F

flache Ausführung – Liegehöhe 8 cm

Beispiele – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

Art.-Nr.	Abmessungen Schaumstoffkern	Material	Raumgewicht / Stauchhärte
Komfortstufe premium (fester, stabiler, länger haltbar)			
LV.NK3-70.32.5+	70 x 32 x 5-8 cm	viskoelastischer Polyurethanschaum	85 / 2,7 kPa
Komfortstufe medium (weicher)			
LV.NK2-70.32.5+	70 x 32 x 5-8 cm	viskoelastischer Polyurethanschaum	50/ 2,2 kPa

VISKOLASTIC® Nackenstützkissen M

mittlere Ausführung – Liegehöhe 10 cm

Beispiele – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

Art.-Nr.	Abmessungen Schaumstoffkern	Material	Raumgewicht / Stauchhärte
Komfortstufe premium (fester, stabiler, länger haltbar)			
LV.NK3-70.32.8+	70 x 32 x 8-10 cm	viskoelastischer Polyurethanschaum	85 / 2,7 kPa
Komfortstufe medium (weicher)			
LV.NK2-70.32.8+	70 x 32 x 8-10 cm	viskoelastischer Polyurethanschaum	50/ 2,2 kPa

VISKOLASTIC® Nackenstützkissen H

hohe Ausführung – Liegehöhe 13 cm

Beispiele – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

Art.-Nr.	Abmessungen Schaumstoffkern	Material	Raumgewicht / Stauchhärte
Komfortstufe premium (fester, stabiler, länger haltbar)			
LV.NK3-70.32.10+	70 x 32 x 10-13 cm	viskoelastischer Polyurethanschaum	85 / 2,7 kPa
Komfortstufe medium (weicher)			
LV.NK2-70.32.10+	70 x 32 x 10-13 cm	viskoelastischer Polyurethanschaum	50/ 2,2 kPa

Die Lieferung erfolgt staubfrei verpackt in PE-Folie und, falls erforderlich, einem zusätzlichen Karton, frei Haus. Ersatzbezüge sind kurzfristig lieferbar. Sondergrößen sowie Zuschnitte, zum Beispiel als Schlange oder Dreieckskissen, sind in Absprache möglich.