

PURLASTIC Matratze MINI Standardmatratze für Kinderbetten



Material

Schaumstoffkern

MP.SM1

→ Polyätherschaum – Raumgewicht 40 / Stauchhärte 2,9 kPa

Bezug

weißgrüner PERLASTIC® Vollschutzbezug (andere Farben oder Bezugsstoffe in Absprache möglich)

→ aus Polyester-Rundstrickware mit diffusionsfähiger Polyurethanbeschichtung

→ mit L-Reißverschluss (andere Verschlüsse oder komplettes Einnähen in Absprache möglich)

Ausstattung und Verarbeitung

- entsprechend MPG (CE-Kennzeichen) und Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1
(für den direkten Hautkontakt mit Babys geeignet)

Schaumstoffkern

- 1-teilig, 1-schichtig

PERLASTIC® Vollschutzbezug

- flüssigkeits-, bakterien- und virendicht
 - Flüssigkeitsdichte nach DIN 53886 > 3.000 mm
- beständig gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel
 - auch nach 100facher alkoholischer Desinfektion
- beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette
- atmungsaktiv
 - Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53122, Klima B ca. 600 g/m² in 24 h bei 37 °C
- bi-elastisch und formbeständig, besonders stabil und haltbar
 - Flächengewicht 230 g/m² +/- 5 %

Kennzeichnung

CE-Kennzeichen (Medizinprodukt Klasse 1), Artikelbezeichnung und -spezifikation, Herstellername und Datum der Herstellung, Chargen-Nummer sowie Anwendungs- und Aufbereitungsempfehlung


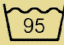




Zusätzliche Kennzeichnung, zum Beispiel Logo und Name Ihrer Einrichtung, in Absprache möglich.

Gutachten

- spezielle Gutachten zum Schutzbezug

Aufbereitung

Matratzen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind nach Auffassung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) **Medizinprodukte der Klasse 1**. Sie unterliegen damit den Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes (MPG) und der Medizinproduktebetriebersverordnung (MPBetreibV). So sind zum Beispiel Mitarbeiter, die Matratzen aufbereiten, hinsichtlich Aufbereitungsverfahren und zulässiger Desinfektionsmittel einzuweisen.

Was?	Wann? (Bitte ggf. ergänzen!)	Wie?	Womit? (Bitte eintragen!)	Wer? (Bitte eintragen!)
PURLASTIC Matratze MINI (PERLASTIC® Schutzbezug und Schaumstoffkern)	bei Verschmutzung, nach jedem Patientenwechsel	 Wisch-desinfektion	Abwischen des Schutzbezuges mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch	
	bei grober Verschmutzung oder hochkontagiösen Erkrankungen	chemo-thermische Aufbereitung des Schutzbezuges in der Waschmaschine mit einem entsprechend geeigneten, desinfizierenden Waschmittel  bis 95 °C  trocknen im Tumbler bis 120 °C  NICHT MANGELN!		
	nicht erforderlich, aber möglich	Aufbereitung in der VDV-Kammer  bis 105 °C Empfehlung: 75 °C*		
Schaumstoffkern (ohne Bezug)	bei defektem Schutzbezug ACHTUNG: Der defekte Schutzbezug ist zu entsorgen (siehe MPBetreibV)!	Aufbereitung in der VDV-Kammer  bis 105 °C Empfehlung: 75 °C*		

* Bei regelmäßiger thermischer Aufbereitung sowie bei Temperaturen über 75 °C können die physikalischen Eigenschaften des Schaumstoffes beeinträchtigt werden. Wir empfehlen daher für die Aufbereitung unserer Polyätherschaummatratzen eine Temperatur von 75 °C bei längerer Haltezeit.

Die Wäschesymbole finden Sie auch auf der Bedruckung und dem Einnähetikett unseres PERLASTIC® Schutzbezuges.

Auf unserem Aufbereitungsplan können Sie die entsprechend in Ihrer Einrichtung verwendeten Desinfektions- und Waschmittel sowie die Verantwortlichen einfügen. Sie können ihn für Schulungen und als Gedächtnisstütze für Ihre Mitarbeiter verwenden. Die entsprechende PDF-Datei finden Sie auch auf unserer Internetseite www.wulff-med.de im Klinik- und Heimbereich unter Infomaterial / Produkte oder über unsere Suchfunktion oben rechts.

PURLASTIC Matratze MINI

Beispiele – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

Art.-Nr.	Abmessungen Schaumstoffkern	Material	Raumgewicht / Stauchhärte	max. Körper- gewicht*
MP.SM1- 140.70.10	140 x 70 x 10 cm	10 cm Polyätherschaum	40 / 2,9 kPa	80 kg

* Die Angaben zum maximalen Körpergewicht dienen als Richtwerte. Der tatsächliche Auflagedruck hängt auch von der Körpergröße und -kontur (BMI) sowie von der Einstellung des Bettes (flach oder hoch) ab.

Die Lieferung erfolgt staubfrei und flach verpackt in PE-Folie und, falls erforderlich, einem zusätzlichen Karton, frei Haus. Ersatzbezüge sind kurzfristig lieferbar. Sondergrößen und -höhen sowie Zuschnitte, auch mit anderen Raumgewichten und Stauchhärten, sind in Absprache möglich.