


VISKOLASTIC® Antidekubitusmatratze PREMIUM

Spezialmatratze zur effizienten Dekubitusprophylaxe und -therapie mit sehr guter Druckverteilung und Stabilität sowie längerer Haltbarkeit

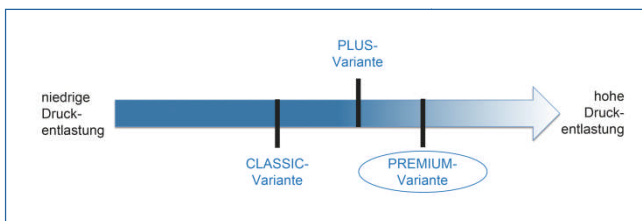

Wichtige Information zur Abbildung:

Unter Verwendung der Ergebnisse aus Druckverteilungsmessungen verschiedener Kombinationen aus viskoelastischen Polyurethanschäumen und Polyäther-Kaltschäumen bieten wir Ihnen unsere VISKOLASTIC® Antidekubitusmatratze in drei Varianten an: CLASSIC, PLUS und PREMIUM.

Dafür, welche Auflagefläche die beste für einen bestimmten Druckgeschwürgrad ist, gibt es nach Ansicht der EPUAP^{*1} und der ddl^{*2} derzeit keinen eindeutigen Beleg. Die Auswahl des richtigen Hilfsmittels muss unter der Berücksichtigung individueller Faktoren Ihrer Patienten, zum Beispiel Grunderkrankungen, Wundsituation und Dekubitusrisiko, erfolgen.

^{*1} European Pressure Ulcer Advisory Panel (europäische Fachgesellschaft aus Dekubitusexperten)

^{*2} Deutsche Dekubitus Liga e.V.

Material

Schaumstoffkern

MV.AP1

→ viskoelastischer Polyurethanschaum – Raumgewicht 85 / Stauchhärte 2,7 kPa

→ Polyäther-Kaltschaum – Raumgewicht 55 / Stauchhärte 3,7 kPa

bei Artikeln mit Randzonenverstärkung (RZ)

→ je 10 cm breite Verstärkung an beiden Längsseiten

→ aus Polyätherschaum – Raumgewicht 40 / Stauchhärte 4,5 kPa

Bezug

blauer PERLASTIC® Vollsutzbezug (andere Farben oder Bezugstoffe in Absprache möglich)

→ aus Polyester-Rundstrickware mit diffusionsfähiger Polyurethanbeschichtung

→ mit verdecktem L-Reißverschluss (andere Verschlüsse oder komplettes Einnähen in Absprache möglich)

Ausstattung und Verarbeitung

- entsprechend MPG (CE-Kennzeichen) und Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1
(für den direkten Hautkontakt mit Babys geeignet)

Schaumstoffkern

- 1-teilig, 2-schichtig
- viskoelastische Liegefläche mit Lüftungsschlitzen zur Verbesserung des Mikroklimas und der Feuchtigkeitsableitung (ab 14 cm Matratzenhöhe)
- Schichten durch ineinander greifenden Konturschnitt ohne zusätzliche Luftkanäle zusammen gefügt
- zur Vermeidung von Klebnähten und für eine bessere Druckverteilung mit lösungsmittelfreiem Klebstoff an nur sechs Punkten am Rand verklebt
- zur Reduzierung der auf den Schaumstoff wirkenden Reib- und Scherkräfte sowie für eine höhere Stabilität und längere Lebensdauer der Matratzen mit einen Trikotstrumpf überzogen

PERLASTIC® Vollschutzbezug

- flüssigkeits-, bakterien- und virendicht
 - Flüssigkeitsdichte nach DIN 53886 > 3.000 mm
- beständig gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel
 - auch nach 100facher alkoholischer Desinfektion
- beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette
- atmungsaktiv
 - Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53122, Klima B ca. 600 g/m² in 24 h bei 37 °C
- bi-elastisch und formbeständig, besonders stabil und haltbar
 - Flächengewicht 230 g/m² +/- 5 %

Kennzeichnung

CE-Kennzeichen (Medizinprodukt Klasse 1), Artikelbezeichnung und -spezifikation, Herstellername und Datum der Herstellung, Chargen-Nummer sowie Anwendungs- und Aufbereitungsempfehlung


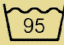




Zusätzliche Kennzeichnung, zum Beispiel Logo und Name Ihrer Einrichtung, in Absprache möglich.

Gutachten

- Druckverteilung (Berlin Cert, 16.02.2007 – Konturschnitt ohne Luftkanäle + Berlin Cert, 07.02.2008)
- Flammpfung nach DIN EN 597 (CENTEXBEL Zwijnaarde, 30.01.2004)
- Reib- und Scherkräftreduzierung (CENTEXBEL Zwijnaarde, 26.06.2008)
- spezielle Gutachten zum Schutzbezug

Aufbereitung

Matratzen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind nach Auffassung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) **Medizinprodukte der Klasse 1**. Sie unterliegen damit den Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes (MPG) und der Medizinproduktebetriebersverordnung (MPBetreibV). So sind zum Beispiel Mitarbeiter, die Matratzen aufbereiten, hinsichtlich Aufbereitungsverfahren und zulässiger Desinfektionsmittel einzuweisen.

| Was? | Wann? (Bitte ggf. ergänzen!) | Wie? | Womit? (Bitte eintragen!) | Wer? (Bitte eintragen!) |
|---|---|---|------------------------------|----------------------------|
| VISKOLASTIC® Antidekubitus- matratze PREMIUM (PERLASTIC® Schutzbezug und Schaumstoffkern) | bei Verschmutzung, nach jedem Patientenwechsel |  Abwischen des Schutzbezuges mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch <small>Wisch- desinfektion</small> | | |
| | bei grober Verschmutzung oder hochkontagiösen Erkrankungen | chemo-thermische Aufbereitung des Schutzbezuges in der Waschmaschine mit einem entsprechend geeigneten, desinfizierenden Waschmittel  bis 95 °C  trocknen im Tumbler bis 120 °C  NICHT MANGELN! <small>nicht mangeln</small> | | |
| | nicht erforderlich, aber möglich | Aufbereitung in der VDV-Kammer  bis 75 °C | | |
| Schaumstoffkern (ohne Bezug) | bei defektem Schutzbezug ACHTUNG: Der defekte Schutzbezug ist zu entsorgen (siehe MPBetreibV)! | Aufbereitung in der VDV-Kammer  bis 75 °C | | |

Die Wäschesymbole finden Sie auch auf der Bedruckung und dem Einnähetikett unseres PERLASTIC® Schutzbezuges.

Auf unserem Aufbereitungsplan können Sie die entsprechend in Ihrer Einrichtung verwendeten Desinfektions- und Waschmittel sowie die Verantwortlichen einfügen. Sie können ihn für Schulungen und als Gedächtnisstütze für Ihre Mitarbeiter verwenden. Die entsprechende PDF-Datei finden Sie auch auf unserer Internetseite www.wulff-med.de im Klinik- und Heimbereich unter Infomaterial / Produkte oder über unsere Suchfunktion oben rechts.

VISKOLASTIC® Antidekubitusmatratze PREMIUM ohne Randzonenverstärkung

Beispiele – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

| Art.-Nr. | Abmessungen Schaumstoffkern | Material | Raumgewicht / Stauchhärte | max. Körper- gewicht* |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| MV.AP1- 200.90.14 | 200 x 90 x 14 cm | 7 cm viskoelastischer Polyurethanschaum 7 cm Polyäther-Kaltschaum | 85 / 2,7 kPa 55 / 3,7 kPa | 120 kg |
| MV.AP1- 200.90.16 | 200 x 90 x 16 cm | 7 cm viskoelastischer Polyurethanschaum 9 cm Polyäther-Kaltschaum | 85 / 2,7 kPa 55 / 3,7 kPa | 140 kg |

VISKOLASTIC® Antidekubitusmatratze PREMIUM mit Randzonenverstärkung

für ein besseres Mobilisieren des Patienten / Bewohners

Beispiele – andere Abmessungen und Ausstattungen in Absprache möglich

| Art.-Nr. | Abmessungen Schaumstoffkern | Material | Raumgewicht / Stauchhärte | max. Körper- gewicht* |
|------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| MV.AP1- 200.90.14RZ | 200 x 90 x 14 cm | 7 cm viskoelastischer Polyurethanschaum 7 cm Polyäther-Kaltschaum | 85 / 2,7 kPa 55 / 3,7 kPa | 120 kg |
| MV.AP1- 200.90.16RZ | 200 x 90 x 16 cm | 7 cm viskoelastischer Polyurethanschaum 9 cm Polyäther-Kaltschaum | 85 / 2,7 kPa 55 / 3,7 kPa | 140 kg |

* Die Angaben zum maximalen Körpergewicht dienen als Richtwerte. Der tatsächliche Auflagedruck hängt auch von der Körpergröße und -kontur (BMI) sowie von der Einstellung des Bettes (flach oder hoch) ab.

Die Lieferung erfolgt staubfrei und flach verpackt in PE-Folie und, falls erforderlich, einem zusätzlichen Karton, frei Haus. Ersatzbezüge sind kurzfristig lieferbar. Sondergrößen und -höhen sowie Zuschnitte, auch mit anderen Raumgewichten und Stauchhärten, sind in Absprache möglich.